

IDENTIFIKACIJA HELMINATA

Uputstva za transport uzorka

Helmint

Helminta staviti u čistu posudu sa poklopcem na navoj u koju je prethodno dodat fiziološki rastvor u količini koja je dovoljna da helmint bude potopljen. Transportovati na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata ili na +4 °C u roku od 24 sata. Ukoliko se transport odlaže na period duži od 24 sata, umesto fiziološkog rastvora u posudu sipati 70 % alkohol. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Bioptat

Bioptat staviti u čistu posudu sa poklopcem na navoj u koju je prethodno dodat fiziološki rastvor u količini koja je dovoljna da uzorak bude potopljen. Transportovati na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata ili na +4 °C u roku od 24 sata. Ukoliko se transport odlaže na period duži od 24 sata, umesto fiziološkog rastvora u posudu sipati 70 % alkohol. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.